

NÁVOD NA POUŽITIE

hydrosprej

Hypertonický nosový sprej

hydrosprej je nosový sprej s hypertonickým soľným roztokom s koncentráciou 3 % a s prídavkom kyseliny hyaluronovej a tymianu. Znižuje opuch nosovej sliznice a zároveň podporuje zriedovanie hlienu. Napomáha odtoku sekrétov, preto je užitočný na udržiavanie čistých nosových priechodov, najmä pri nádche, alergickej nádche, zápale nosovej sliznice a prínosových dutín. Je tiež vhodný na zlepšenie pooperačného priebehu v oblasti nosových dutín alebo priebehu akútneho zápalu nosovej sliznice, prínosových dutín a nosohltana.

ZLOŽENIE: voda, hyaluronát sodný, chlorid sodný, tymianová destilovaná voda, dihydrogénfosforečnan draselný, hydrogénfosforečnan draselný, sorban draselný.

NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím pretrepte. Pri prvom použití alebo po dlhšej dobe nepoužívania stlačte dávkovač niekoľkokrát, kým sa neuvolní prvá dávka prípravku. Na aktiváciu aplikátora zatlačte dvoma prstami na spodnú časť dávkovača.

1 vstreknutie do každej nosovej diery až trikrát denne pre deti od 3 do 12 rokov.

1 alebo 2 vstreknutia do každej nosovej diery až štyrikrát denne pre osoby staršie ako 12 rokov.

UPOZORNENIA: Zabráňte kontaktu s očami. Nepoužívajte, ak je balenie otvorené alebo poškodené. V súčasnosti nie sú známe žiadne interakcie s liekmi. V prípade nežiaducich reakcií prerušte liečbu, poraďte sa s lekárom a informujte výrobcu. V prípade precitlivosti alebo individuálnej alergie na jednu alebo viacero zložiek prípravok nepoužívajte. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 3–5 dní, poraďte sa s lekárom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití nevyhadzujte obal do prostredia. Používanie u detí musí byť pod dohľadom dospeléj osoby. V prípade tehotenstva alebo dojčenia používajte prípravok pod lekársym dohľadom.

SKLADOVANIE: Nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na obale; dátum expirácie sa vzťahuje na neotvorené a správne skladované balenie. Skladujte pri izbovej teplote, chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla a/alebo nadmernou vlhkosťou prostredia; chráňte pred kontaktom s vodou. Spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.



GRICAR CHEMICAL Srl
Via San Giuseppe 18/20,
Brugherio MB, Taliansko
e-mail: salute@gricar.net



15 ml e



DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE:
04/03/2020

Zdravotnícka pomôcka

DISTRIBÚTOR: GENERICA spol. s r.o.,
Vrbovská 39, 921 01 Piešťany,
Slovenská republika

02/26

NÁVOD K POUŽITÍ

hydrosprej

Hypertonický nosní sprej

hydrosprej je nosní sprej hypertonického solného roztoku o koncentraci 3 %, s přídatkem kyseliny hyaluronové a tymiánu. Snižuje otok nosní sliznice a zároveň podporuje zředění hlenu. Napomáhá odtoku sekretů, a proto je užitečný při udržování čistých nosních cest, zejména při nachlazení, alergické rýmě, zánětu nosní sliznice a vedlejších nosních dutin. Je užitečný pro zlepšení pooperačního průběhu v oblasti nosních dutin nebo při průběhu akutního zánětu nosní sliznice, vedlejších nosních dutin a nosohltanu.

SLOŽENÍ: voda, hyaluronan sodný, chlorid sodný, destilovaná voda z tymiánu, dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan draselný, sorban draselný.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Před použitím protřepejte. Při prvním použití nebo po delší době bez používání dávkovače několikrát stiskněte, dokud se neobjeví první dávka přípravku. Pro aktivaci aplikátoru stiskněte základnu dávkovače dvěma prsty.

1 vstřík do každé nosní dírký až třikrát denně u dětí ve věku od 3 do 12 let.

1 až 2 vstříky do každé nosní dírký až čtyřikrát denně pro osoby starší 12 let.

UPOZORNĚNÍ: Vyvarujte se zasažení očí. Nepoužívejte, pokud je balení otevřeno nebo poškozeno. V současnosti nejsou známy žádné interakce s léky. V případě nežádoucích reakcí léčbu zastavte, poraďte se s lékařem a informujte výrobce. V případě přecitlivělosti nebo individuální alergie na jednu nebo více složek přípravku nepoužívejte. Budou-li příznaky přetrvávat po 3–5 dnech, poraďte se s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití obal nelikvidujte. Na používání u dětí musí dohlížet dospělá osoba. V případě těhotenství nebo kojení přípravek používejte pod lékařským dohledem.

UCHOVÁVÁNÍ: Nepoužívejte po uplynutí data expirace uvedeného na obalu; datum expirace platí pro neotevřené a řádně uchovávané balení. Uchovávejte při pokojové teplotě, vyvarujte se expozice přímým zdrojům světla a tepla a/nebo nadměrné vlhkosti prostředí; zamezte kontaktu s vodou. Po otevření spotřebujte do jednoho měsíce.

 GRICAR CHEMICAL Srl
Via San Giuseppe 18/20,
Brugherio MB, Itálie
e-mail: salute@gricar.net

CE 0477

15 ml e



DATUM POSLEDNÍ REVIZE:
04/03/2020

Zdravotnický prostředek

DISTRIBUTOR: GENERICA spol. s r.o.,
Vrbovská 39, 921 01 Piešťany,
Slovenská republika

02/26